



T.C
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI



DOK. KOD: YD-İAŞ.07

YAYIN TARİHİ:01.03.2012

REVİZYON NO:02

REVİZYON TARİHİ:20.08.2019

SAYFA NO:1/1

İŞ AKIŞ ŞEMASI	YÖNTEM	SORUMLUSU	KAYIT
	Gelen aletler Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde çalışan sorumlu tarafından teslim alınır.	Günün Sorumlu Personeli	M.S.Ü Kayıt Klasörü M.S.Ü Set Teslim Fişi
	Doğru alet ve sayı bakımından kontrol edilir, eksiklik durumunda Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi ile Acil ve diğer Klinik ve Poliklinik Sorumlularına haber verilir.	Günün Sorumlu Personeli	M.S.Ü Kayıt Klasörü
	Alet ve malzeme üzerinde kan ve organik kirleri uzaklaştırmak amacıyla akan su ile ön temizlik yapılır. Ultrasonik yıkama, yıkama ve dezenfektan makineleri ve elle enzimatik çözümleri kullanılarak dekontaminasyonu yapılır. Durulama demineralize su ile yapılır. Kurutma, basınçlı hava ve kuru bez ile yapılır.	Günün Sorumlu Personeli	M.S.Ü Kayıt Klasörü
	Aletlerin çalışması ve sayısı kontrol edilir. Uygun paketleme materyalleri seçilir. Zarf yada dikdörtgen usulü bohça yapılır. Poşetleme tekniğine uygun olarak aletler ve malzemeler poşetlenir. Paketlerin ve bohçaların üzerine içerik, tarih, sterilizasyonu yapan kişinin adı soyadı yazılır. Set ve bohçaların içerisine mutlaka kimyasal indikatör ve set teslim tutanağı yazılarak konulur.	M.S.Ü.Sorumlu Hemşiresi ve Personeli	M.S.Ü Kayıt Klasörü
	Otoklavlar her gün Bow-dick Testi, haftada bir gün Biyolojik Test yapılarak kalibrasyonu yapılır.	M.S.Ü.Sorumlu Hemşiresi ve Personeli	M.S.Ü Kayıt Klasörü Bowdick ve Biyolojik Test Kontrol Formu
	Sterilizasyon tekniğine uygun bohça ve paketler sterilizatörlere, otoklav ve sterilizatörüne yerleştirilir.	Günün Sorumlu Personeli	M.S.Ü Kayıt Klasörü M.S.Ü.Dökümantasyon Formu
	Kuru ve sıcak hava ile sterilizasyonda; 170 °C'de 1 saat, 160 °C'de 2 saat Buhar ile Sterilizasyonda ; 134 °C'de 3,5 - 4 dk., 120 °C'de 15 dk.	Günün Sorumlu Personeli	M.S.Ü Kayıt Klasörü
	Çıkan bohça ve paketler üzerindeki kontrol bantlarında renk değişikliği kontrol edilir. Renk değişikliği olumlu ise dağıtım odasına gönderilir, olumsuz ise sterilizatörlerin kalibrasyonları yapılarak sterilizasyon işlemi tekrarlanır.	M.S.Ü.Sorumlu Hemşiresi ve Personeli	M.S.Ü Kayıt Klasörü
	Sterilizatörden çıkan bohça ve malzemeler dağıtım yapılacak birimlere temiz taşıma araçları ile gönderilir. Dağıtım yapılmayan malzemeler depoda uygun koşullarda depolanır. Depoda bulunan malzemeler, günlük, haftalık, aylık sterilizasyon yönünden kontrol edilir. Polipropilen poşet ile 1 yıl, sterilizasyon poşetleri ile 6 ay, çift kat tekstil ile paketlenmiş malzemeler 30 gün, çift kat wrap ile paketlenmiş malzemeler 30 gün saklanır.	Günün Sorumlu Personeli	M.S.Ü Kayıt Klasörü
	Kayıt sisteminde, yapılan işlemlerin ve testlerin kayıtları, temizlik kaydı, dekontaminasyon performans testleri, arıza tamir bakım ve validasyon raporları, kayıt kartları bölümlerini içermelidir. Kayıtlar 5 yıl süre ile saklanmalıdır. .S.Ü.Set teslim fişleri M.S.Ü.tarafından toplanır ve saklanır.	M.S.Ü.Sorumlu Hemşiresi ve Personeli	M.S.Ü Kayıt Klasörü



T.C
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI



DOK. KOD: YD-İAŞ.07

YAYIN TARİHİ:01.03.2012

REVİZYON NO:02

REVİZYON TARİHİ:20.08.2019

SAYFA NO:1/1

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu	Kalite Yön. Sor. Başhekim Yrd.	Başhekim